

Rozmiary oraz indywidualne dostosowywanie Heelift®



Teraz dostępna instrukcja video!
www.darco-europe.com/videos

Łatwe zakładanie (dotyczy wszystkich modeli)



Włóż stopę do wnętrza buta tak, aby pięta znalazła się poza miejscem podparcia. Pięta powinna swobodnie zwiśać poza gąbką podpierającą.




Łuźno zapnij paski mocujące. Nie napinaj ich mocno. Nie powinny mieć kontaktu ze skórą.



Sprawdź czy mocowanie jest odpowiednie. Paski mocujące powinny być luźne.



But uznajemy za założony poprawnie wtedy, gdy możemy umieścić palec pomiędzy piętą a łóżkiem.

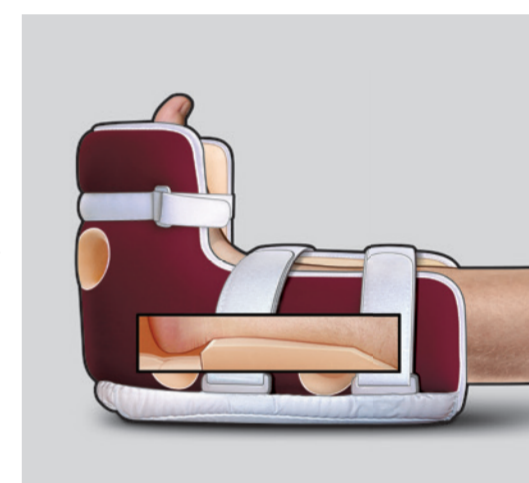

Zakładanie zakończone. (Heelift® powinien być zdejmowany a noga i stopa kontrolowana pod względem stanu skóry co 6 – 8 godzin.)

Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb (dotyczy wszystkich modeli)



Rotacja stopy oraz biodra: Przymocuj dodatkową piankę z odpowiedniej strony.




Terapia kompresyjna: Załóż but normalnie razem z rękawem kompresyjnym a rurkę umieść w taki sposób, by swobodnie wychodziła z buta.



Opadająca stopa: Zamocuj dodatkową piankę w pozycji wertykalnej za podszewową częścią stopy.



Zapalenie Achillesa: Wytnij kształt V w piance przymocowanej do buta.

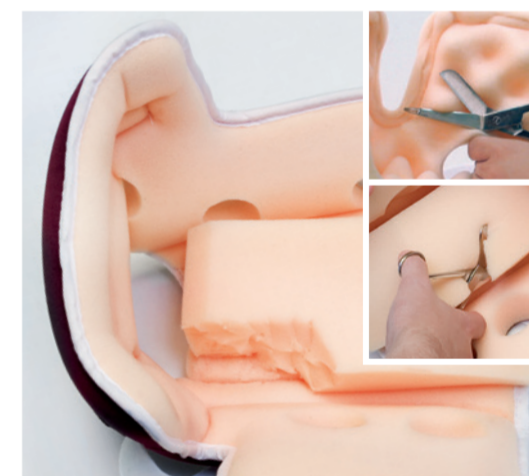

Odleżyna na kostce: W celu zindywidualizowania, usuń niepotrzebne elementy z boku pianki oraz wytnij kawałek przymocowanej pianki do buta.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

Mycie ręczne: Używaj łagodnych środków piorących oraz ciepłej wody.
Pranie oraz suszenie: Zapnij paski oraz umieść w worku do prania.
Dezynfekcja: Używaj sprayów antyseptycznych.
Sterylizacja: Zapnij paski i stosuj się do instrukcji sterylizacji parowej. Pozwól na ostygnięcie oraz wysuszenie się przez 2 godziny po zakończeniu cyklu.
Materiał: Pianka poliuretanowa nie zawierająca lateksu.
Rekomendowane do indywidualnego zastosowania dla 1 pacjenta.

Heelift®



Heelift® Glide



Heelift® AFO



Rozmiary

Rozmiar	Petite	Normal	Bariatric
Waga w kg	32 – 59	54 – 113	100 – 272
Obwód голени w cm	15 – 25	20 – 36	30 – 58
Heelift® Smooth Standard	✓	✓	✓
Heelift® Glide Smooth Standard	✓	✓	✓
Heelift® AFO Smooth Standard		✓	✓

Materiał

Standard
Karbowana pianka pozwalająca na lepszą cyrkulację powietrza.

Smooth
Gładka pianka przeznaczona dla delikatnej skóry.

Dodatkowe informacje jak i instrukcje stosowania możecie znaleźć na stronie www.iconic.pl

ICONIC

ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

www.darco-europe.com

DARCO