

Heelift® – 3 wersje odciążenia pięty przyspieszające proces leczenia ran

Efektywne odciążenie ran oraz odleżyn w obrębie pięty, szczególnie dla pacjentów leżących.

Heelift®



> Oryginalny model – idealne i ekonomiczne rozwiązanie w celu odciążania pięty.

Heelift® Glide



> Wersja premium buta Heelift® – posiada dodatkowy pasek w części przedniej zapewniający zwiększoną podporę przodostopia a specjalny materiał na zewnętrznej jego powierzchni ułatwia przesuwanie buta.

Heelift® AFO



> Heelift® AFO – ulepszona wersja zawierająca wszystkie cechy Heelift® Glide oraz dodatkowo stabilizującą podporę pozwalającą na przemieszczanie.


- > stosowany w celu zapobiegania oraz leczenia owrzodzeń i odleżyn w obrębie pięty
- > idealny dla cukrzyków z neurologicznym brakiem czucia
- > sprawdza się w przypadku przedłużającego się unieruchomienia jak i w śpiączce
- > pozwala na indywidualne dostosowanie rozwiązania do wymogów pacjenta

dostępna w 2 wersjach gąbki wewnętrznej: z wytłoczeniami (karbowana) oraz gładka




DARCO

Co sprawia, że Heelift® jest optymalnym rozwiązaniem dla Twojego pacjenta.

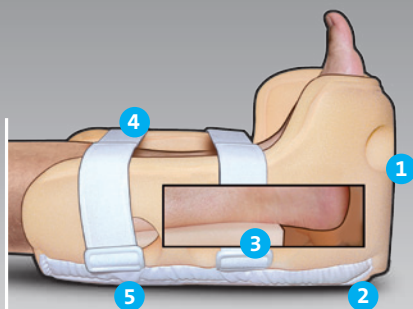

Wszystkie produkty z rodziny Heelift® posiadają:

- 1 **Wentylujące otwory** – zapewniają dodatkową cyrkulację powietrza by zwiększyć komfort użytkownika.
- 2 **Otwór w części tylnej** – dzięki któremu możliwe jest wizualne sprawdzenie stanu pięty.
- 3 **Dołączona podkładka podnosząca** – unosi nogę by podwiesić piętę, dzięki czemu tworzy odpowiednie środowisko dla leczenia owrzodzeń czy też odleżyn.
- 4 **Delikatne paski mocujące** – to najwygodniejsze rozwiązanie pozwalające na indywidualne dostosowanie obuwia do wymagań pacjenta.
- 5 **Śliskie trykotowe wyściełanie części tylnej** – pomaga w przesuwaniu nogi po łóżku oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

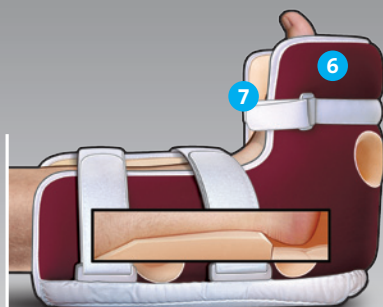


Heelift® Glide dodatkowo posiada:

- 6 **Trwała warstwa zewnętrzna** – zabezpiecza bardzo płynne i łatwe ślizganie się nogi po łóżku.
- 7 **Taśma na przedniej części stopy** – utrzymuje bezpiecznie pozycję obuwia i pozwala na podparcie przodostopia.

Wybór rodzaju pianki

Gładka pianka została stworzona specjalnie dla pacjentów o bardzo delikatnej skórze. Rozwiązanie to również zapobiega pojawianiu się obrzęków. Ten rodzaj pianki polecany jest specjalnie pacjentom diabetologicznym.

Specjalna konstrukcja pianki z wytłoczeniami zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Zastosowane wytłoczenia gwarantują również efekt chłodzenia.

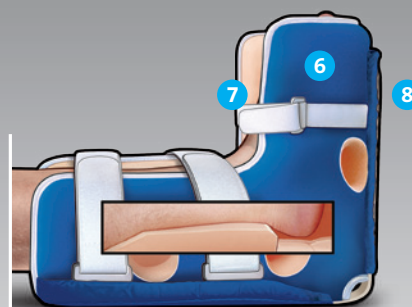

Heelift® AFO dodatkowo posiada:

- 6 **Trwała warstwa zewnętrzna** – zabezpiecza bardzo płynne i łatwe ślizganie się nogi po łóżku.
- 7 **Taśma na przedniej części stopy** – utrzymuje bezpiecznie pozycję obuwia i pozwala na podparcie przodostopia.
- 8 **Pół-twarda opaska** – zapewnia najlepszą z możliwych kontroli pozycji kostki jak i jej przemieszczania.



Symb. Rozmiar (Obwód łydki)

Heelift®

Standard (pianka karbowana):

DM-HLP Petite (15 – 25 cm)
DM-HL Normal (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)

DM-HLSP Petite (15 – 25 cm)
DM-HLS Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSB Bariatric (30 – 58 cm)

Kolor: Beżowy

Heelift® Glide

Standard (pianka karbowana):

DM-HLPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLG Normal (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)

DM-HLSPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLSG Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSBG Bariatric (30 – 58 cm)

Kolor: Czerwony

Heelift® AFO

Standard (pianka karbowana):

DM-HLAFO Uniwersalny (20 – 36 cm)

Smooth (gładka pianka)

DM-HLSAFO Uniwersalny (20 – 36 cm)

Kolor: Beżowy

Produkty z rodziny Heelift® pasują na prawą i lewą nogę. Mogą być prane bezpiecznie w temperaturze do 60 oraz wolno jest sterylizować w autoklawie dla zapewnienia sterylności.



ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
info@darco.de | www.darco.de



141210