

MedSurg

+ Pediatric MedSurg



+ DARCO

Instrukcja użytkowania



MedSurg/Pediatric MedSurg

Obuwie pooperacyjne

Obuwie MedSurg zapewnia stabilizację, pochłanianie nacisku jak i odciążanie po zabiegach chirurgicznych. But pasuje zarówno na prawą jak i lewą nogę.

1. Otwórz but za pomocą odczepianych pasków velcro (A i B).
2. Upewnij się, że stopa jest odpowiednio ustawiona w butcie.
3. Pokrywa wierzchnia buta może być przekładana na każdą ze stron, co pozwala na odpowiednie dostosowanie buta do prawej i lewej nogi.
4. But może być dostosowany do prawej i lewej stopy również poprzez odpowiednie dopasowanie pasków (B). Logo powinno być umieszczone na zewnętrznej stronie stopy.
5. Przeciągnij paski na lewą bądź prawą stronę tak by krótszy koniec usytuowany był na zewnętrznej klapie buta. Umieść tasiemkę na niej i dostosuj odpowiednio zaciskając pasek.
6. Dłuższy koniec na wewnętrznej części buta przenieś na drugą stronę i zamocuj na uchu. Zaciągnij by uzyskać odpowiednią siłę zacisku.
7. Teraz można odpowiednio skrócić paski.

Wskazania

- > pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążania
- > miejscowe odciążenie po pęknięciach i złamaniach oraz osteotomiach

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Dane techniczne

Rozmiar:

3 rozmiary damskie:

WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)

4 rozmiary męskie:

MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), MXL (45,5 – 47)

1 rozmiar dziecięcy (Medsurge Oryginal Pediatric):

Uniwersalny (do wielkości 32)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

Kolor: Czarny

Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Siatka z poliestru

Paski: Nylon

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:

Cholewka wykonana z oddychającego nylonu, który jest rozciągliwy. Gumowa podeszwa wykonana z TPR, charakteryzująca się cechami pozwalającymi na pochłanianie nacisku. Profil wkładki pozwala łatwiejsze przemieszczanie się.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.
- > Umyć w zimnej wodzie z mydłem.

Uwaga

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Rekomenduje się stosowanie w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

EC REP

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China

