

# Relief Dual<sup>®</sup>



**DARCO**

## Instrukcja używania

### Relief Dual®

But odciążający

Relief Dual® jako but odciążający zapewnia stabilizację oraz chroni stopę przed uderzeniami oraz redukuje nacisk na stopę po zabiegach chirurgicznych. But pasuje zarówno na prawą oraz lewą stopę.

1. Odepnij paski velcro (A, B).
2. Upewnij się, że stopa jest bezpiecznie umieszczona w butcie.
3. Obuwie może być dopasowane na prawą bądź lewą nogę poprzez indywidualne dostosowanie pasków velcro (A, B).
4. Pociągnij za wierzchni pasek velcro A na prawą lub lewą stronę tak by część z haczykami była na zewnątrz buta po obu stronach. Umieść pasek na językach oraz odpowiednio naciągnij. Jeżeli to konieczne, skróć pasek.
5. Języki mogą na siebie nachodzić.
6. Zapnij but dolnym paskiem B, tak by logo DARCO było widoczne na zewnętrznej stronie buta.

## Wskazania

- > pooperacyjnie w celu stabilizacji oraz redystrybucji nacisku – np. osteotomie w obrębie stopy

### Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

## Instrukcja dotycząca czyszczenia

### Myć ręcznie:

- > Kiedy obuwie jest lekko zabrudzone, przetrzyj je miękką szmatką bądź delikatną szczoteczką.
- > Nie suszyć suszarką. Obuwie musi wysychać samoistnie w temperaturze pokojowej.

1.



2.



## Uwaga

Zawsze stosuj się do tej instrukcji. W przypadku efektów niepożądanych (np.: swędzenie, problemy z cyrkulacją krwi itp) prosimy o kontakt z lekarzem. Nieodpowiednie stosowanie produktu powoduje, że jego poprawne funkcjonowanie nie może być zagwarantowane. Ten produkt, razem z odpowiednim obuwiem, jest przeznaczony do wsparcia procesu leczenia i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. DARCO nie bierze na siebie odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Zaleca się zakładanie opatrunków lub skarpet. Nie prowadź samochodu w tym obuwiu. Chodź ostrożnie oraz wolniej niż normalnie. Produkt do zastosowania indywidualnego.

## Dane techniczne

### Rozmiar:

3 rozmiary damskie : WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)

4 rozmiary męskie: MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), MXL (45 – 48)

**Kolor:** Szary

### Materiał:

Zelówka: guma, EVA

Wkładka: EVA

Materiał zewnętrzny: pianka poliestrowa, microfibra

Wyściółka wewnętrzna: poliester

Pasek napinający: Wełna

Paski velcro : Nylon

Klej: klej poliuretanowy

**Naprawy:** produkt nie wymaga naprawy

### Cechy konstrukcyjne:

Zewnętrzna część wykonana jest z oddychającego nylonu, który rozciąga się w każdą ze stron. Zelówka wykonana z gumy oraz EVA dające efekt absorpcji nacisku. Kotłyskowy kształt zelówki ułatwia przetaczanie podczas chodzenia.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań  
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
info@darco-europe.com  
www.darco-europe.com

### Manufactured by:

DARCO Int. Trading  
(Shanghai) LTD  
No. 128 Lane  
3458 Hu Min Road  
Shanghai 201108, China



170803