

Dane techniczne

Rozmiary:

- > dostępne w 7 rozmiarach
- > uniwersalna, pasuje do obuwia DARCO

Wszystkie rozmiary można stosować w następujących produktach DARCO:

- > OrthoWedge – Obuwie odciążające przodostopie
- > OrthoWedge Light – Obuwie odciążające przodostopie
- > HeelWedge® – Obuwie odciążające piętę
- > MedSurg/-Pro – Obuwie pooperacyjne
- > APB® – Obuwie pooperacyjne uniwersalnego zastosowania
- > SlimLine® – Obuwie na gips oraz pooperacyjne długiego zastosowania

Materiał:

18 milimetrowa wkładka składa się z 3 warstw: EVA, Plastazote® oraz wierzchnia warstwa wykonana z Poron®.

Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Wkładkę można czyścić letnią wodą z mydłem lub też stosować standardowe środki dezynfekujące i czyszczące.



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



PegAssist Insole



DARCO

Instrukcja użytkowania

PegAssist Insole

Wkładka odciążająca

Wkładka PegAssist Insole efektywnie odciąża spodnią część stopy. Prosty sposób wyciągania poszczególnych elementów wkładki, pozwala na indywidualizację wkładki zarówno pooperacyjnie jak i w stanach ostrych. Cienka przykrywka kartonowa stabilizuje miejsce odciążenia i zabezpiecza przed ewentualnym wypadaniem lub przesuwaniem się otaczających miejsce owrzodzenia elementów wkładki. Nacisk jest zredukowany o 60%.

Rekomendacje:

1. Usuń oryginalną, czarną wkładkę z buta (rys.1).
2. Włóż wkładkę PegAssist do buta niebieską warstwę u góry (rys. 2).
3. Zaznacz miejsce owrzodzenia markerem na stopie pacjenta (rys.3).
4. Pacjent powinien teraz stanąć na wkładce i odbić zaznaczone miejsce na niebieskiej warstwie wkładki (rys.4).
5. Delikatnie usuń czarne elementy pod zaznaczonym miejscem, w którym należy dokonać odciążenia (rys.5).
6. Przymocuj kartonową przykrywkę na czarną część wkładki. Przykrywka jest podklejona, dzięki czemu dokładnie przykleja się do wkładki i mocuje elementy bezpiecznie na swoim miejscu i zabezpiecza przed przesuwaniem (rys.6).
7. Włóż wkładkę do buta (rys.7).
8. Przygotowanie odciążenia zakończone (rys. 8).

Wskazania

- > odciążenie miejscowe
- > stany ostre
- > niwelowanie bólu
- > opieka pooperacyjna

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Uwaga

- > Rekomenduje się noszenie bandażu, opatrunków bądź skarpet.
- > W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie jak i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

