

TAS[®]

(Toe Alignment Splint)



DARCO

Instrukcja użytkowania

TAS® Toe Alignment Splint

Palce młotkowate (rys. 1 – 3):

Taśma śródstopowa wykonana jest z elastycznej bawełny i została tak skonstruowana by pasować na każdą stopę. Zapnij taśmę wokół śródstopia tak jak pokazano na rysunku 1 i 2.

Taśma wokół pięty zabezpiecza przed przesuwaniem się taśmy. Proszę ją zapiąć tak jak pokazano na rysunku 3.

Koślawość V kości śródstopia (rys. 4 – 5):

Jeżeli jest to konieczne tasiemki na mały palec mogą być doczepione do taśmy śródstopowej (rys. 4 – 5).

Hallux Valgus (rys. 6 – 9)

Tasiemka na paluch koślawy powinna być tak zamocowana, jak pokazano na rysunku 6 – 7.

Element stabilizujący jest doczepiony z boku do tasiemki na palec za pomocą rzepów (rys. 8 – 9).

Wskazania

- > Hallux valgus
- > Palce młotkowate
- > Koślawość V kości śródstopia
- > Palce szponowate

Przeciwwskazania

- > Nieznane

Uwaga


Używany pooperacyjnie, służy do podtrzymania rezultatów zabiegu. Jeżeli odczuwacie jakieś skutki uboczne (swędzenie skóry, zaburzenia cyrkulacji krwi itp.) prosimy niezwłocznie skonsultować się z Waszym lekarzem. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem, jego poprawne funkcjonowanie jak i bezpieczeństwo pacjenta nie mogą być zagwarantowane.

Dane techniczne


Rozmiar: Uniwersalny

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw

Material: Elastyczna bawełna, Nylon

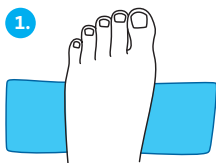

Opaska metatarsalna

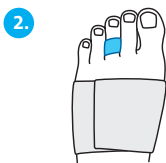


Opaska na palec





Opaska na piętę



Opaska na palec

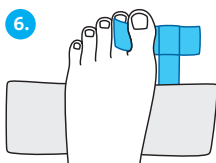

Opaska na paluch

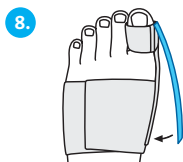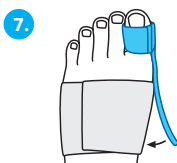

Element stabilizujący



Instrukcja dotycząca czyszczenia

> Można prać w temperaturze do 30 stopni



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China

