


DARCO Toe Cap

WCS[®], OrthoWedge, TwinShoe[®],
MedSurg /-Pro[®], Relief Dual[®]

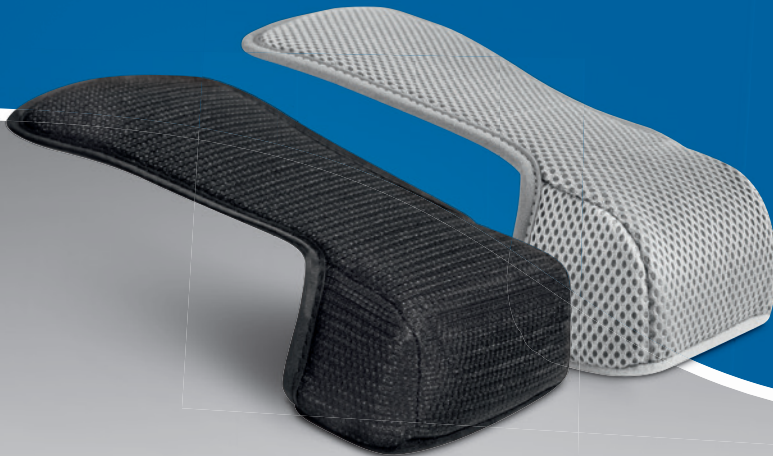

DARCO

Instrukcja używania

DARCO Toe Cap

DARCO Toe Cap (zdjęcie 1) to kapa zakrywająca, która zastosowana w butcie otwartym pozwala zamienić go w but całoroczny z zamkniętą częścią przednią. Kapa chroni stopę przed zimnem oraz brudem.

Instrukcja zastosowania:

1. Wyjmij ruchomą wkładkę z buta ortopedycznego.
2. Odczep pasek velcro z kapy oraz oderwij białą taśmę przykrywającą podklejenie (zdjęcie 2).
3. Następnie przyklej pasek velcro równoległe do brzegu wkładki na jej wewnętrznej stronie. Proszę zwrócić uwagę, by pasek velcro nie znajdował się dalej niż 2 cm od brzegu wkładki (zdjęcie 3).
4. Teraz umieść wkładkę wraz z kapą w butcie.
5. Dociśnij wkładkę by upewnić się, że jest odpowiednio umieszczona a następnie zapnij but jak zwykle.

Dane techniczne

Rozmiary:

Pasuje na lewy i prawy but w przypadku następującego obuwia : OrthoWedge, TwinShoe®, MedSurg/-Pro®, Relief Dual®

Różna dla prawego oraz lewego buta w przypadku obuwia WCS®.

Kolor: Czarny, szary tylko w przypadku Relief Dual®

Materiał:

WCS®: Spandex oraz poliester

OrthoWedge, TwinShoe®, MedSurg: Dacron poliester

MedSurg Pro®: piankowa siatka poliestrowa

Relief Dual®: pianka poliestrowa, microfibra

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw. DARCO Toe Cap jest skonstruowana do zastosowania tylko na jednym butcie.


Uwaga

Ten produkt uzupełnia obuwie i chroni stopę przed zimnem oraz brudem. Jeżeli odczujesz ból, nienaturalne swędzenie i inne niespodziewane reakcje przestań stosować ten produkt i skontaktuj się z lekarzem. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje, że poprawne funkcjonowanie produkty nie może być zagwarantowane.

1.



3.

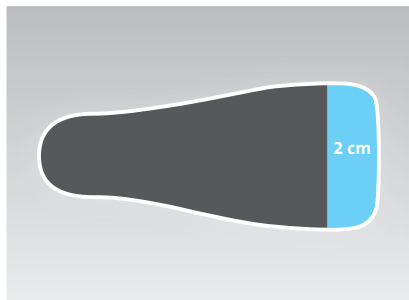

2.



4.



Zastosowanie

> Ochrona przed zimnem oraz brudem.

Czyszczenie

DARCO Toe Cap może być myta ręcznie.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com



DARCO International Inc.
810 Memorial Blvd. | Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866 | Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170323