

# SlimLine<sup>®</sup>

+ SlimLine<sup>®</sup> Pediatric



# DARCO

## Instrukcja używania

### SlimLine® / -Pediatric

Obuwie na gips

1. Otwórz but (A).
2. Umieść stopę w butcie.
3. Proszę się upewnić, że stopa jest dobrze ustawiona w butcie i pięta jest cofnięta do końca buta.
4. Zamknij but przy pomocy pasków (A). Stopa powinna być umieszczona komfortowo w butcie, nie za lekko i nie za ciasno.

#### Opcjonalnie:

Wewnętrzna wkładka może zostać wyjęta przez specjalistę i zastąpiona innym rozwiązaniem.

## Wskazania

- > złamania oraz zabezpieczenie gipsu

## Instrukcja dotycząca czyszczenia

#### Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach. Pozwolić obuwiu wysychać w temperaturze pokojowej.

## Uwaga

Lekarz przepisał obuwie, które wygląda jak normalny but. Konstrukcja pozwala na szybsze leczenie złamań oraz pooperacyjne przy nieograniczonej mobilności. Chodzenie w takim butcie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nie prowadź samochodu w takim butcie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego podczas chodzenia potrzebne jest więcej przestrzeni do postawienia stopy w tym butcie. Otyły pacjent, z powodu dużego nacisku miejscowego, może doprowadzić do pęknięcia podeszwy. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim lekarzem lub technikiem ortopedą. Rekomenduje się stosowanie obuwia w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami.



## Dane techniczne

### Rozmiary

#### 5 Rozmiarów dla dorosłych (SlimLine®):

XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0)

#### 3 rozmiary dziecięce (SlimLine® Pediatric):

S (do rozmiaru 21), M (22 – 26), L (27 – 32)

Uniwersalny. Pasuje na prawą oraz lewą stopę.

### Kolor:

Model dla dorosłych (SlimLine®): czarny

Model dziecięcy (SlimLine® Pediatric): niebieski lub różowo-niebieski.

### Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: EVA/Poliester

Paski®: Nylon

**Naprawy:** Produkt nie wymaga napraw.

### Cechy konstrukcyjne:

Cholewka wykonana z oddychającego poliestru. Podeszwa wykonana z gumy TPR z dodatkową efektem pochłaniania nacisku. Profil podeszwy pozwala na łatwiejsze przetaczanie.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań  
tel. 608 332 018 | [magdalena.gorna@iconic.pl](mailto:magdalena.gorna@iconic.pl) | [www.iconic.pl](http://www.iconic.pl)



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
[info@darco-europe.com](mailto:info@darco-europe.com)  
[www.darco-europe.com](http://www.darco-europe.com)



DARCO International, Inc.  
810 Memorial Blvd.  
Huntington  
WV 25701, USA  
[www.darcointernational.com](http://www.darcointernational.com)

**Manufactured by:**

DARCO Int. Trading  
(Shanghai) LTD  
No. 128 Lane  
3458 Hu Min Road  
Shanghai 201108, China

