

Body Armor® Heel Reliever






But odciążający piętę



+



DARCO

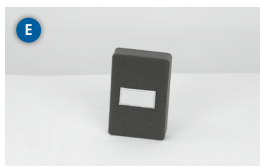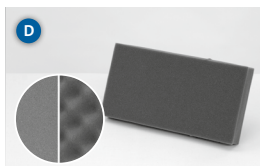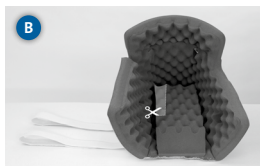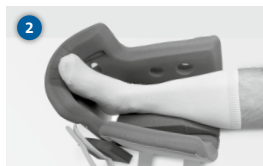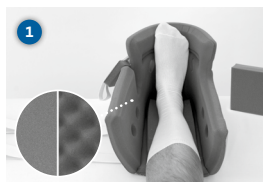

Body Armor® Heel Reliever | But odciążający piętę

But odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever służy do zapobiegania i leczenia odleżyn na piętę, a także zespołu stopy cukrzycowej.

1. Otworzyć but odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever. Wyjąć dodatkową wyciółkę piankową (zdjęcie D). Należy zachować dodatkową wyciółkę, ponieważ może być potrzebna później do indywidualnego dopasowania.
2. Stopę pacjenta należy ułożyć w taki sposób w butcie, aby pięta znajdowała się bezpośrednio nad wycięciem. Pięta powinna się w każdym przypadku znajdować poza zamocowaną na stałe wyciółką piankową (zdjęcia 1 + 2).
3. Przeciągnąć taśmy z zapięciami na rzep nad kością piszczelową w kierunku pętli na nodze. Poprowadzić taśmę przez pętlę na nodze. Przymocować taśmę zapięciem na rzep (zdjęcie 3). W przypadku szczególnie suchych łydek założyć skrzydełko boczne na zakładkę.
4. Sprawdzić dopasowanie. Między otworem na piętę a łóżkiem powinno być wystarczająco dużo miejsca na palec ręki (zdjęcie 4). Buta odciążającego piętę nie należy zapinać zbyt luźno ani zbyt mocno wokół nogi. Zapięcia na rzep nie powinny mieć styczności ze skórą nogi. W celu zapewnienia ochrony można opcjonalnie wprowadzić wyciółkę do przodostopia (zdjęcie E) między taśmę na rzep i stopę (zdjęcie 5).
5. Instrukcja użycia: W zależności od pacjenta i wskazania należy zdecydować, czy ma być zastosowany but odciążający piętę o powierzchni gładkiej czy karbowanej (zdjęcie 1).

Indywidualne dopasowanie:

- > Opadająca stopa: Dodatkową wyciółkę umieścić pionowo za podeszwą stopy (zdjęcie A).
- > Odleżyny w obrębie kostek nóg: Wycięć karbowanie we wnętrzu buta wokół kostki nogi. W razie potrzeby usunąć również część zamocowanej na stałe wyciółki piankowej (zdjęcie B).
- > Rotacja biodra: Zamocować klin pozycjonujący (zdjęcie F) odpowiednio do zastosowania na buciku odciążającym piętę.
- > Nogi otyle: Jeśli pięta dotyka do przeciwcięcia, należy umieścić dodatkową wyciółkę piankową na zamocowanej na stałe wyciółce piankowej w celu podwyższenia.
- > Ścięgno Achillesa: W przypadku zaczerwienienia w tym obszarze należy wyciąć otwór w kształcie litery „V” w zamocowanej na stałe wyciółce piankowej. W przypadku stosowania obu wyciółek piankowych należy dopasować również górną wyciółkę piankową (zdjęcie C).

Obciążenie pięty jest przenoszone na ścięgno Achillesa oraz kompleks mięśnia płaszczkowatego i mięśnia brzuchatego łydki. Co 6-8 godzin należy zdejmować but odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever oraz sprawdzać nogę i stopę pod kątem zmian skórnych. W przypadku zacerwienia skóry (rumienia) w rejonie ścięgna Achillesa postępować zgodnie z powyższym opisem. W przypadku pacjentów z obrzękami stosować produkt Body Armor® Heel Reliever w wariacie o gładkiej powierzchni, aby uniknąć podrażnień skóry.

Wskazania

- > Do zapobiegania i leczenia odleżyn na pięcie, w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz odleżyn
- > 14 punktów lub mniej w skali Bradena
- > Cukrzyca z neurologicznym brakiem czucia
- > Brak wyczuwalnego tętna w stopie
- > Porażenia poprzeczne
- > Długotrwałe unieruchomienie (>godzin) lub śpiączka

Przeciwwskazania:

- > Rany na łydce
- > Spastyczność
- > Skurcz mięśni kostki

Dane techniczne

Do uniwersalnego stosowania na prawą i lewą nogę (obwód łydki: 25-54 cm)

Kolor: szaro-niebieski

Materiał: But odciążający piętę:

Poszewka zewnętrzna: poliester

Wyściółka z tworzywa piankowego:

Niezawierające lateksu poliuretanowe tworzywo piankowe

Taśmy na rzep: nylon

Wyściółka na przodostopie: poliester,

bezlateksowa pianka poliuretanowa

Zapasowe poszewki: Niezawierające lateksu poliuretanowe tworzywo piankowe

Klin pozycjonujący:

Poszewka: poliester

Klin: kopolimer etylenu i octanu winylu

Worek do prania: poliester

Konserwacja: Produkt nie wymaga konserwacji.

Cechy konstrukcyjne: But odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever jest dostępny w dwóch wersjach: karbowanej i gładkiej. Obydwa warianty produktu są laminowane gładką poszewką tekstylną, umożliwiającą „poślizg” nogi bez zmiany pozycji uwolnionego miejsca.

Prawidłowe zamocowanie produktu na ciele pacjenta zapewniają trzy paski, utrzymujące przodostopie i łydkę w pionowym położeniu. W przypadku nadmiernej rotacji nogi w stawie biodrowym prawidłowa pozycja nogi może być uzyskana dzięki klinowi pozycjonującemu. Zawarta w opakowaniu zapasowa poszewka na rejon łydki i grzbietowej powierzchni stopy umożliwi indywidualne, rozdzielające nacisk i pewne ułożenie produktu. But odciążający piętę Body Armor® Heel Reliever może być noszony na lewej i prawej nodze.

Instrukcja czyszczenia

Pranie ręczne:

- > Używać łagodnych środków piorących i ciepłej wody. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Pranie w pralce:

- > Zapiąć taśmy na rzep oraz prać i suszyć w worku do prania (zdjęcie G) lub poszewce (60°C). Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- > Dezynfekcja po praniu: sprayem antyseptycznym.

Do czyszczenia można stosować wodę, normalne środki piorące i środki dezynfekcyjne. Podczas prania taśmy na rzep powinny być z zasady zamknięte.

Ostrzeżenie

Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych (np. obrzęku skóry, odcisków, zaburzeń krążenia krwi itp.) należy poinformować lekarza. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem nie można już zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony. Niniejszy środek pomocniczy służy do leczenia i może być stosowany wyłącznie zgodnie z instrukcjami lekarza lub fachowego personelu medycznego (lub po konsultacji). Firma DARCO (Europe) GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Nie nosić produktu na zranionej, podrażnionej, uszkodzonej czy w inny sposób naruszonej skórze. Używać np. opatrunków lub skarpet. Ten środek pomocniczy jest przeznaczony do stosowania tylko u jednego pacjenta. Jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania w pozycji leżącej; pacjent nie powinien chodzić z założonym produktem.

Utylizacja: > Wyrzucić po użyciu.

- > Zutyliзовать opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska. Produkt można teraz zutyliзовать wraz z odpadami domowymi.



Distributor:

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018
biuro@iconic.pl
www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 8807 9228-0
Fax +49 8807 9228-22
info@darco.de | www.darco.de

Made in China

