

Body Armor[®] Walker II



DARCO

Instrukcja używania

Body Armor® Walker II

1. Odblokuj klamry i odciągnij ochraniacz goleni.
2. W przypadku konieczności dokonania odciążenia miejsca występowania owrzodzenia, miejsca pęknięcia czy też innych miejsc występowania bólu, wyciągnij spodnią wkładkę i postępuj zgodnie z instrukcją opisaną poniżej.
3. Otwórz szeroko skorupę Walkera i opuszczaj stopę piętą w dół w stronę wkładki. Uprzednio załóż grubą bawełnianą skarpetę.
4. Umieść ochraniacz goleni na swoim miejscu i zabezpiecz tak, by wszedł pod brzegi skorupy Walkera.
5. Zainstaluj taśmy mocujące i dostosuj siłę ściśnięcia. Zamknij klamry.

Zaznaczanie miejsc owrzodzenia i indywidualizowanie wkładki.

1. Zaznacz miejsce owrzodzenia, które należy odciążyć za pomocą flamastra, na stopie.
2. Stań z nogą umieszczoną w Walkerze na wkładce i w ten sposób zaznacz miejsce owrzodzenia na zewnętrznej warstwie wkładki.
3. Dziurkuj obwód zaznaczonego miejsca owrzodzenia w 2 umieszczonych poniżej warstwach wkładki za pomocą ostrego narzędzia. W ten sposób zaznaczysz miejsce, które należy wyciąć.
4. Na spodzie dolnej wkładki obrysuj miejsca, które należy wyciąć zgodnie z instrukcją opisaną na zdjęciu.

Modyfikacje odciążenia (A)

Po odpowiednim zlokalizowaniu miejsca owrzodzenia, które powinno zostać odciążone, użyj noża lub wiertła by wyciąć to miejsce pod raną. Ważnym jest by wykonać ukosowanie brzegów otworu (pod kątem około 30 stopni) tak by otwór dalej od stopy był większy niż jego otwarcie na górnej warstwie. Miejsce odciążenia powinno być nieznacznie większe – ok. 5 mm – niż zewnętrzne brzegi odciążanego miejsca z wyjątkiem odcinka dalszego, gdzie powinno wynosić 12 mm tak jak pokazano na diagramie A. Proszę użyć ostrego narzędzia do wycinania otworu we wkładce, by dokonać precyzyjnego cięcia. W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Wskazania

- > w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej w przypadku leczenia ran otwartych i niewielkich owrzodzeń
- > w celu dokonania odciążenia
- > po złamaniach Webera i pęknięciach
- > alternatywne rozwiązanie dla gipsu unieruchamiającego

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia

By wyczyścić skorupę zewnętrzną jak i wyściółkę wewnętrzną, proszę zastosować letnią wodę o temperaturze około 30 stopni oraz łagodne mydło, jeżeli to będzie konieczne. Umij warstwę wewnętrzną i wysusz od razu. Zostaw but otwarty by powietrze mogło go samoistnie osuszać. Nie stosuj żadnych suszarek.

1.



2.



3.




4.



5.



A.

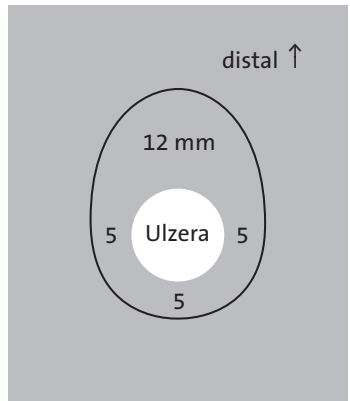

Uwaga

Twój lekarz przepisał Ci produkt, który zastępuje gips. Konstrukcja kołyskowej podeszwy gwarantuje poprawne fizjologicznie przetaczanie podczas chodzenia. Chodzenie w takim butcie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

- Nie prowadź samochodu w takim butcie.
- Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i chodzenia po nierównych powierzchniach.
- Chodź wolniej niż normalnie. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego potrzebne jest więcej miejsca przy stawianiu kroków.

Stosowanie tego produktu powinno być nadzorowane przez lekarza. W przypadku odczucia swędzenia czy też wystąpienia bólu, proszę niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Proszę zwrócić szczególną uwagę w przypadku pacjentów z neuropatią. Chodzi o zapewnienie, by Walker nie powodował ograniczeń w cyrkulacji krwi. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią jakiegokolwiek sytuacje niepożądane takie jak: stwierdzenie bólu, swędzenia, obserwowalnych zmian lub innych wcześniej nie występujących reakcji.

W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

Dane techniczne

Rozmiar:

Sprzedawany pojedynczo, dostępny w 5 rozmiarach
XS (do 34), S (35 – 38), M (39 – 42), L (43 – 46), XL (47 – 49)

- dostępne w wersji krótkiej oraz długiej
- Uniwersalny – można go nosić zarówno na prawej jak i na lewej nodze

Materiał:

Zewnętrzna wkładka: TPR

Wewnętrzna wkładka: EVA + Plastazote

Materiał wewnętrzny: Poliester

Goleń: cast wykonany z poliuretanu



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com



DARCO International Inc.
810 Memorial Blvd. | Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866 | Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170201