


Relief Contour Insole

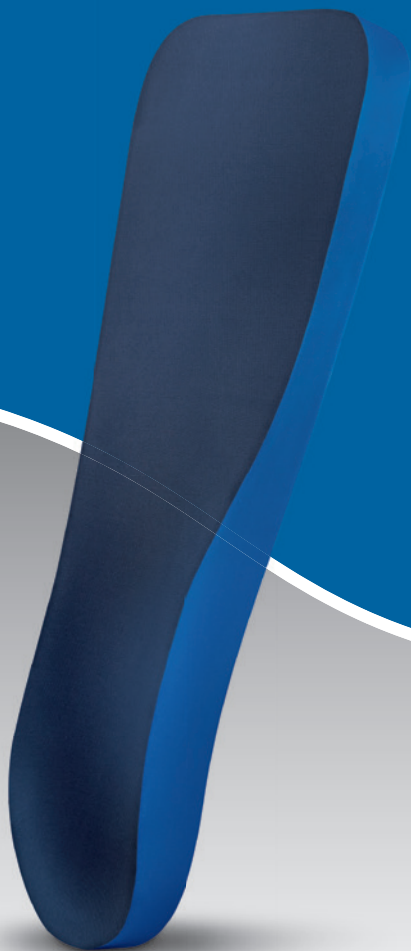

DARCO

Instrukcja używania

Relief Contour Insole

Relief Contour to wkładka wyścielająca. Optymalna redystrybucja nacisku jest osiągnięta dzięki jej kształtowi dostosowanemu do anatomii stopy. Specjalne wzornictwo wkładki pozwala na przejęcie nacisku z podszewkowej części stopy aż do 90%. Samonośny poliuretan, z którego wykonana jest wkładka, przejmuje nacisk z przeciążanych miejsc. W razie konieczności, poliuretan może być docinany, co pozwala na indywidualizację wkładki do potrzeb pacjenta.

Rekomendacje dotyczące stosowania:

1. Wyjmij oryginalną wkładkę z buta.
2. Umieść prawą bądź lewą wkładkę w bucie na miejsce wyjętej – oryginalnie zastosowanej – wkładki.
3. Uwaga: w ten sposób obuwie uniwersalne – jakim było na początku – nabiera cech charakterystycznych dla lewego oraz prawego buta.

Wskazania

- > stosowany po zabiegach na hallux oraz po małych zabiegach chirurgicznych na palcach (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc)
- > stopa koślawą, płaskostopie
- > angio-neuropatyczne zmiany w obrębie stopy w połączeniu z deformacjami stopy

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte
- > nie stosować w przypadku zabiegów w obrębie tyłostopia / pięty
- > widoczne deformacje w przypadku ZSC

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Wkładka może być myta w letniej wodzie lub przy zastosowaniu standardowych dezynfektantów. Nie susz wkładki suszarką, wręcz przeciwnie pozwól na wysychanie w temperaturze pokojowej.

Uwaga

Zawsze stosuj się do tej instrukcji. W przypadku efektów niepożądanych (np.: swędzenie, problemy z cyrkulacją krwi itp) prosimy o kontakt z lekarzem. Nieodpowiednie stosowanie produktu powoduje, że jego poprawne funkcjonowanie nie może być zagwarantowane. Ten produkt, razem z odpowiednim obuwem, jest przeznaczony do wsparcia procesu leczenia i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. DARCO nie bierze na siebie odpowiedzialności niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu. Zaleca się zakładanie opatrunków lub skarpet. Nie prowadź samochodu w tym obuwie. Chodź ostrożnie oraz wolniej niż normalnie. Produkt do zastosowania indywidualnego.

Dane techniczne

3 rozmiary żeńskie:

WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)

4 rozmiary męskie

MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45), MXL (45,5 – 47)

Dostępne w wersji na prawą oraz lewą stopę.

Kolor: Niebieski

Odpowiada rozmiarowo następującym rodzajom obuwia:

- > Relief Dual® – but odciążający
- > MedSurg – but pooperacyjny
- > MedSurg Pro® – but pooperacyjny

Materiał:

Wkładka wykonana z poliuretanu.

Wyściółka wykonana z 18% elastanu oraz 82% z poliamidu.

Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw serwisowych.

Cechy konstrukcyjne:

Wkładka Relief Contour w swej konstrukcji posiada 2,4 stopniowe obniżenie pięty, skutkiem czego otrzymujemy delikatnie zwiększony nacisk na piętę oraz automatyczne odciążenie przodostopia. Łuk podłużny oraz poprzeczny gwarantują perfekcyjną redystrybucję nacisku. Miejsca przeciążenia są zmniejszone dzięki miękkiemu wyścieleniu wkładki.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Made in EU



170804