

OrthoWedge



DARCO

Instrukcja użytkowania



OrthoWedge

Obuwie odciążające przodostopie

1. Otwórz but (A).
2. Umieść stopę w bucie.
3. Upewnij się, że stopa jest bezpiecznie ustawiona w bucie.
4. Zapnij but za pomocą pokrywy i rzepów oraz pasków (A), tak by stopa nie była umieszczona zbyt luźno ani zbyt ciasno.
5. Podczas chodzenia dociążaj but tylko do punktu B. Nigdy nie przenoś ciężaru do punktu C. W przeciwnym razie możesz negatywnie wpłynąć na wynik leczenia.
6. W przypadku, gdy but musi być noszony przez dłuższy czas, wskazanym jest zastosowanie na drugiej stopie obuwia wyrównującego (TwinShoe). Ten but nie powinien być noszony dłużej niż 6 – 9 tygodni.

Wskazania

- > pooperacyjnie po zabiegach na Halux Valgus, palcach młotkowatych, osteotomiach
- > leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.

Uwaga

Twój lekarz przepisał Ci obuwie wysokiej jakości, które służy do odciążenia operowanej i leczonej części stopy. Pozwala to na skrócenie procesu leczenia ran, owrzodzeń, pęknięć oraz po innych ingerencjach chirurgicznych. Pozwala na przemieszczanie się. Chodzenie w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Rekomenduje się stosowanie buta w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

Dane techniczne

5 Rozmiarów:

XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Poliester

Paski: Nylon

Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:

Wkładka może być usunięta i zastąpiona wkładką PegAssist Insole.

Rekomendacje:

Można stosować wraz z butem wyrównującym TwinShoe.

Wkładka PegAssist Insole pozwala na zindywidualizowanie wkładki, by dokonać precyzyjnego odciążenia.

EC REP

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China

