

# APB<sup>®</sup>



# DARCO

## Instrukcja użytkowania



### APB®

Obuwie pooperacyjne uniwersalnego zastosowania

1. Otwórz but (A).
2. Umieść stopę w butcie.
3. Proszę się upewnić, że stopa jest dobrze ustawiona w butcie i pięta jest cofnięta do końca buta.
4. Zamknij but przy pomocy pasków (A). Stopa powinna być umieszczona komfortowo w butcie, nie za lekko i nie za ciasno.

## Wskazania

- > pooperacyjnie by ustabilizować stopę
- > gdy zastosowano opatrunki bądź gips

### Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

## Instrukcja dotycząca czyszczenia

### Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.

## Uwaga

Lekarz przepisał obuwie, które wygląda jak normalny but. Konstrukcja pozwala na szybsze leczenie pooperacyjne przy nieograniczonej mobilności. Chodzenie w takim bucie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nie prowadź samochodu w takim bucie. Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i przemieszczania się po nierównych powierzchniach. Chodź wolniej niż normalnie. Otyły pacjent, z powodu dużego nacisku miejscowego, może doprowadzić do pęknięcia podeszwy. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim lekarzem lub technikiem ortopedą. Rekomenduje się stosowanie obuwia w połączeniu z bandażami, opatrunkami i skarpetami.

## Dane techniczne

### 5 Rozmiarów:

XS (33,5 – 37), S (37,5 – 39,5), M (40 – 41,5), L (42,0 – 44,0), XL (44,5 – 47,0)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

### Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Poliester

Paski: Nylon

### Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw.

### Cechy konstrukcyjne:

Cholewka wykonana z oddychającego poliestru. Podeszwa wykonana z gumy TPR z dodatkową efektem pochłaniania nacisku. Profil wkładki pozwala na łatwiejsze przemieszczanie się. Wkładka może być usunięta i zastąpiona wkładką PegAssist Insole.

**EC REP**

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22  
info@darco.de, www.darco.de



DARCO International, Inc.  
810 Memorial Blvd.  
Huntington, WV 25701, USA  
Toll-free 800.999.8866  
Phone 304.522.4883  
Fax 304.522.0037  
www.darcointernational.com

**Manufactured by:**

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD  
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road  
Shanghai 201108, China

