

Heelift®



DARCO

Heelift® Suspension Boot

1. Otwórz but Heelift®. Odłóż dodatkową piankę na bok. Umieść w dostępnym miejscu, możesz jej potrzebować później w celu dostosowania buta do indywidualnych potrzeb.
2. Umieść stopę w butcie tak by pięta znajdowała się poza pianką. Pięta powinna swobodnie zwiśać poza pianką (zdjęcie 1 + 3). W przypadku szczególnie małych bądź dużych goleni, prosimy o kierowanie się wskazówkami dotyczącymi rozmiarów oraz stosowanie dodatkowej pianki w celu dokonania indywidualnego dostosowania buta.
3. Przełóż paski napinające przez przelotki, znajdujące się po drugiej stronie buta. Zapnij paski (zdjęcie 2). Pozostaw but lekko otwarty by zapewnić wentylację.
4. Sprawdź czy but jest odpowiednio dopasowany. Powinieneś móc umieścić palce pomiędzy końcówką buta a powierzchnią łożka. But nie powinien poruszać się na nodze. Paski napinające nie mogą mieć kontaktu ze skórą na wierzchniej stronie nogi.

Indywidualne dostosowywanie buta:

- > **Dłuższe golenie:** Umieść dodatkową piankę na końcu (jako przedłużenie) pianki zamontowanej na stałe w butcie.
- > **Opadająca stopa:** Umieść dodatkową piankę wertykalnie na długości stopy wystającej poza podeszwową część buta.
- > **Odleżyny w obrębie stawu skokowego:** Obetnij karbowanie wokół kostki. Wytnij też część z pianki przymocowanej na stałe – o ile to konieczne (zdjęcie B).
- > **Rotacja biodra:** Umieść dodatkową piankę w pozycji horyzontalnej na zewnętrznej części buta (zdjęcie A).
- > **Gruba goleń:** W przypadku, gdy pięta ma kontakt z pianką, umieść dodatkową piankę na powierzchni sztywno przymocowanej pianki, by zwiększyć podwyższenie.
- > **Zapalenie ścięgna Achillesa:** W przypadku pojawienia się w tym miejscu zaczerwienienia, wytnij kształt V w piance. W przypadku używania dodatkowej pianki, wytnij kształt V tylko w wierzchniej piance (zdjęcie D)

Uwaga:

W przypadku noszenia buta Heelift®, możliwe jest przemieszczanie jedynie na krótkich dystansach.

Ostrzeżenia / ryzyka

Obciążenie pięty jest przenoszona na goleni Heelift® powinien być zdejmowany co 6 – 8 godzin, w celu sprawdzenia statusu skóry. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia (rumieniec) konieczne wytnij kształt V w piance zamocowanej na stałe w butcie lub w dodatkowo umieszczonej piance wierzchniej.

Pacjenci z obrzękiem mogą odczuwać nieszkodliwe uciskanie na skórę w przypadku stosowania pianki karbowanej i z tego powodu mogą preferować stosowanie gąbki gładkiej.


1.



A



2.

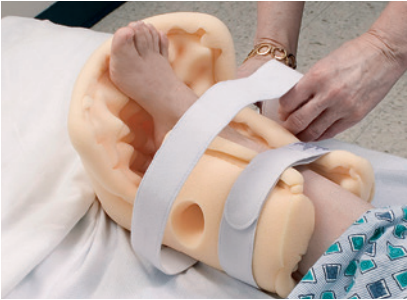

B



3.



C



HEELIFT
SUSPENSION BOOT

D



Wskazania

- > przewencyjnie oraz w leczeniu owrzodzeń i ran na pięcie, przy zespole stopy cukrzycowej oraz w przypadku powstawania odleżyn
- > w przypadku oceny na 14 lub mniej w skali Bradena
- > cukrzyca z neuropatią
- > przy braku wyczuwalnego pulsu
- > dla osób powyżej 65 roku życia
- > porażenie poprzeczne (w każdym wieku)
- > wyraźne deficyty żywieniowe (albumina surowicza < 2,2g/dl)
- > przedłużające się unieruchomienie (> godzin) lub śpiączka

Instrukcja używania

W zależności od pacjenta / czy też wskazań używać Heelift® z pianką gładką bądź karbowaną.

Uwaga

To jest produkt medyczny stosowany do leczenia, dlatego powinien być stosowany pod kontrolą i zgodnie ze wskazaniami lekarza czy fizjoterapeuty. Jeżeli odczuwasz ból, nienaturalne swędzenie, odczuwalne zmiany lub niespotykane wcześniej reakcje, zakończ stosowanie produktu i skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Dane techniczne

Rozmiar

Petite (mały): 15 – 25 cm obwodu goleni
Standard : 20 – 36 cm obwodu goleni
Bariatric (tylko w wersja smooth):
30 – 58 cm obwodu goleni

Zawiera

Podkładka wspierająca
But odciążający
Gąbka poliuretanowa nie zawierającą lateksu.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

- > **Mycie ręczne:** Używaj łagodnych środków piorących oraz ciepłej wody.
- > **Pranie oraz suszenie:** Zapnij paski oraz umieść w worku do prania (60 C).
- > **Dezynfekcja po praniu:** Używaj sprayów antyseptycznych.
- > **Sterylizacja:** Zapnij paski i stosuj się do instrukcji sterylizacji parowej.
Pozwól na ostygnięcie oraz wysuszenie się przez kilka godziny po zakończeniu cyklu.

Do mycia wolno używać wodę, standardowe detergenty oraz dezynfektanty. W trakcie procesu mycia paski powinny być zawsze zapięte. W przypadku prania w wysokich temperaturach zawsze pozwól by Heelift® ostygł i wysechł przed odpięciem pasków. Rekomendowane do indywidualnego zastosowania dla 1 pacjenta.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com



DM Systems, Inc.
1316 Sherman Avenue
Evanston
Illinois 60201, USA

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170110