

AllRound Shoe



DARCO

Instrukcja użytkowania

AllRound Shoe

Obuwie lecznicze do długotrwałego stosowania.

AllRound Shoe to rozwiązanie, które zapewnia stabilizację oraz chroni stopę przed uderzeniami. Ponadto redukuje nacisk wywierany na stopę, szczególnie w miejscu występowania ran po zabiegach operacyjnych jak i podczas leczenia różnego rodzaju ran. Może być stosowany na prawej oraz lewej stopie.

1. Otwórz but, odpinając rzepy Velcro umieszczone na wierzchniej części buta.
2. Upewnij się, że stopa jest umieszczona bezpiecznie w butcie.
3. Zapnij rzepy tak, by stopa komfortowo została umocowana w butcie.

Wskazania

- > pooperacyjnie oraz podczas leczenia różnego rodzaju ran

Przeciwwskazania:

- > złamania otwarte

Instrukcja dotycząca czyszczenia

Czyścić ręcznie:

- > Gdy obuwie jest lekko zabrudzone, czyść je miękką szmatką lub miękką szczoteczką.
- > Proszę nie stosować ostrych środków czyszczących (np. zawierających alkohol).
- > Nie suszyć w suszarce ani żadnych piecykach.

Uwaga

Prosimy zawsze stosować się do niniejszej instrukcji. W przypadku zaobserwowania efektów nieporządaných (jak swędzenie, punkty przeciężeń, problemy w cyrkulacji krwi), prosimy o kontakt z lekarzem. W przypadku niestosowania się do instrukcji, poprawne funkcjonowanie obuwia nie może być gwarantowane. To rozwiązanie wspiera proces leczenia i powinno być stosowane zawsze po konsultacji z lekarzem. Rekomenduje się noszenie opatrunków oraz skarpet wraz z tym obuwem. Nie jest wskazane prowadzenie samochodu w tym obuwie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas chodzenia po schodach jak i nierównych powierzchniach. Proszę chodzić wolniej niż zwykle.



Dane techniczne

6 Rozmiarów:

XS (37 – 38), S (39 – 40), M (41 – 42), L (43 – 44), XL (45 – 46), XXL (47 – 48)

But uniwersalny, pasuje na prawą i lewą nogę.

Kolor: czarny

Materiał:

Podeszwa: PU

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Pianka poliestrowa z siatką

Wyściółka: Poliester

Paski: Nylon

Naprawy: Produkt nie wymaga napraw.

Cechy konstrukcyjne:

Materiał wierzchni wykonany z oddychającego nylonu, który daje się rozciągać we wszystkie strony, dzięki czemu obuwie jest bardzo elastyczne. Podeszwa wykonana z poliuretanu z cechami pochłaniającymi nacisk. Profil podeszwy ułatwia przetaczanie. Podstawa podeszwy jest wzmocniona sztywnikiem. Inne cechy charakteryzujące to rozwiązanie to: szerokie otwarcie buta, indywidualnie dostosowywalne zamykanie buta, wyjmowana wkładka oraz lekki, oddychający oraz odporny na czynniki pogodowe materiał, z którego wykonana jest cholewka.



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Manufactured by:
DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China

