

Body Armor® Cast Shoe



DARCO

Body Armor® Cast Shoe



Instrukcja użytkowania

Body Armor® Cast Shoe

But na gips

Body Armor® Cast Shoe jest stosowany jako but do chodzenia na gips.

But pasuje na prawą i lewą stopę.

1. Odczepić haczyk zamknięcia.
2. Nacisnąć przycisk na zamknięciu w kierunku palców, aby rozszerzyć pasek na kostkę.
3. Odchylenie części piętowej do tyłu dodatkowo ułatwia założenie buta. Włożyć stopę w but.
4. W celu zamknięcia zacisnąć z powrotem pasek na kostkę.
5. Z powrotem zahaczyć zamknięcie.
6. Produkt jest gotowy do stosowania.

Uwaga

Podczas noszenia tego buta nie wolno prowadzić pojazdów.

- > Należy chodzić wolniej niż normalnie.
- > Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia po schodach, przechodzenia przez krawężniki i chodzenia po nierównym podłożu.
- > W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem nie można już zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony.

Dane techniczne

5 rozmiarów:

XS (24 cm), S (26,5 cm), M (29,5 cm), L (31 cm), XL (34,5 cm)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rozmiary podane są w centymetrach (długość stopy z gipsem)

Kolor:

Czarny

Materiał:

EVA

Konserwacja:

Produkt nie wymaga konserwacji

Cechy konstrukcyjne:

Amortyzujący materiał EVA z szerokim otworem pozwalającym na łatwe umieszczenie stopy z gipsem oraz elastycznym systemem sznurującym.

Instrukcja dotycząca czyszczenia

W przypadku nieznacznego zabrudzenia buta można go wytrzeć wilgotną ściereczką lub oczyścić miękką szczoteczką.

Wskazania

- > po zaopatrzeniu gipsem lub opatrunkiem



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866
Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Phone +49 (0) 88 07.92 28-0
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Distributor

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl

Made in China



190506