


# MedSurg Pro<sup>®</sup>



**DARCO**

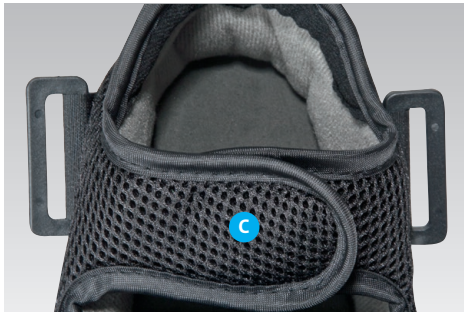

### MedSurg Pro®

But pooperacyjny

But pooperacyjny MedSurgPro zapewnia stabilizację, pochłanianie wstrząsów i redystrybucję nacisku po operacji stopy. But pasuje na prawą i lewą stopę.

1. Otworzyć but za pomocą pasków na rzep (A, B).
2. Uważać, aby stopa była pewnie umieszczona w butcie.
3. But może być dopasowany do lewej lub prawej stopy poprzez odpowiednie umieszczenie pasków na rzep (A, B).
4. Przeciągnąć górny pasek na rzep A na lewą lub prawą stronę, tak aby obustronny pasek z haczykami znajdował się na zewnętrznej stronie buta. Założyć go na języku i zapiąć. W razie potrzeby można indywidualnie skrócić długość górnego paska na rzep.
5. Wewnętrzne języki buta można dowolnie ułożyć na sobie (C).
6. Zamknąć but dolnym paskiem na rzep B, tak aby logo DARCO znajdowało się na zewnętrznej stronie buta.

## Wskazania

- > Pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążenia, np. osteotomie stopy

### Przeciwwskazania:

- > Złamania otwarte

## Uwaga

Podczas noszenia tego buta nie wolno prowadzić pojazdów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia po schodach (np. również przechodzenia przez krawężniki) i chodzenia po nierównym podłożu. Należy chodzić wolniej niż normalnie. Zaleca się noszenie opatrunków lub skarpetek w obuwiu.

### Mycie ręczne:

- > W przypadku nieznacznych zabrudzenia buta można go wytrzeć wilgotną ściereczką lub oczyścić miękką szczoteczką.
- > Nie suszyć buta w suszarce ani na grzejniku. Pozostawić do wysuszenia w temperaturze pokojowej.

## Dane techniczne

### Rozmiary:

3 rozmiary damskie:

WS (34 – 36,5), WM (37 – 38,5), WL (39 – 41)

### 4 rozmiary męskie:

MS (39 – 41), MM (41,5 – 43), ML (43,5 – 45),

MXL (45,5 – 47)

### Kolor:

Czarny  
Wersja niska i wysoka (za kostkę)

### Materiał:

Podeszwa: TPR

Wkładka: EVA

Materiał wierzchni: Foam Polyester Mesh

Podszewka: Brushed Polyester

Paski na rzep: Nylon

### Konserwacja:

Produkt nie wymaga konserwacji.

### Cechy konstrukcyjne:

Część wierzchnia jest wykonana z oddychającej tkaniny nylonowej, która jest rozciągliwa wszędy i w poprzek. Podeszwa jest wykonana z gumy TPR i ma właściwości amortyzujące. Profil wkładki ułatwia przetacanie stopy.



DARCO International, Inc.  
810 Memorial Blvd.  
Huntington, WV 25701, USA  
Toll-free 800.999.8866  
Phone 304.522.4883  
Fax 304.522.0037  
[www.darcointernational.com](http://www.darcointernational.com)



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Phone +49 (0) 88 07.92 28-0  
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
[info@darco-europe.com](mailto:info@darco-europe.com)  
[www.darco-europe.com](http://www.darco-europe.com)

**Distributor**  
ICONIC, Ul. Wrzosowa 28  
60-185 Skórzewo k/Poznań  
tel. 608 332 018  
[magdalena.gorna@iconic.pl](mailto:magdalena.gorna@iconic.pl)  
[www.iconic.pl](http://www.iconic.pl)

Made in China



190506