

# PegContour<sup>®</sup> Insole



**DARCO**



1.

**PegContour® Insole**

Wkładka wyścielająca o strukturze plastra miodu



2.

Wkładka PegContour® Insole to efektywny, trójwymiarowy system wkładek służący redystrybucji nacisku z podszwowej części stopy. Możliwość pojedynczego wyjmowania poszczególnych elementów „plastra miodu” (ang. Peg) pozwala na jej indywidualne dopasowanie – po operacji lub w ostrej fazie leczenia ran. Cienka warstwa z EVA (dno wkładki) utrzymuje opracowany obszar i zapobiega przesuwaniu się pozostałych elementów. Boczny i przyśrodkowy łuk podłużny i łuk poprzeczny zapewniają optymalną redystrybucję obciążenia. Nacisk jest zredukowany maksymalnie do 55%.



3.

**Wskazówki dotyczące stosowania**

1. Wyjąć z buta szarą lub czarną wkładkę oryginalną (zdjęcie 1).
2. Ustalić obszar, który ma być odciążony (zdjęcie 2).
3. Ostrożnie usunąć elementy „plastra miodu” (Peg) w miejscu, gdzie ma być zredukowany nacisk (zdjęcie 3). Użyć do tego odpowiedniego narzędzia lub usunąć elementy wkładki ręką.
4. Odkleić papier zabezpieczający i przykleić (dołączone) dno wkładki na całej powierzchni do elementów „plastra miodu”. Dzięki temu elementy wkładki są przymocowane wokół strefy odciążenia. Zapewnia to, że odciążony obszar nie ulegnie zmianie (zdjęcie 4).
5. Włożyć tak przygotowaną wkładkę PegContour® Insole do buta, przy czym przyklejone dno wkładki musi być zwrócone do dołu (zdjęcie 5).
6. Dopasowywanie zakończone.



4.



5.

## Wskazania

- > po operacjach palucha koślawego (haluksa) i małych palców (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann itp.)
- > stopa koślawca, płaskostopie poprzeczne i podłużne
- > zmiany angioneuropatyczne w obrębie stopy w połączeniu z łagodnymi deformacjami stopy

Miejscowa redystrybucja nacisku w przypadku:

- > uszkodzeń podeszwy części stopy
- > zapobiegania owrzodzeniom w obrębie podeszwy części stopy
- > punktów nadmiernego ucisku

nacisku dzięki łukowi poprzecznemu oraz przysródkowemu i bocznemu łukowi podłużnemu. Rozciągliwa wszerz i w poprzek wyściółka wkładki gwarantuje duży komfort. Łatwe usuwanie elementów „plastra miodu” umożliwi punktowe działanie odciążające. Cienka wkładka przytrzymuje opracowany obszar i zapobiega przesuwaniu się sąsiednich elementów.

## Przeciwwskazania

- > złamania otwarte
- > widoczne deformacje stopy przy ZSC

## Dane techniczne

### Rozmiar:

- > dostępna w 6 lub 7 rozmiarach
- > dostępna w wersji na prawą i lewą stopę

Wkładka jest dostępna w rozmiarach odpowiadających rozmiarom obuwia oraz w dwóch różnych kolorach elementów „plastra miodu” (kolor niebieski lub czarny – w zależności od modelu) stosowanych w następujących rodzajach obiwia:

- > AllRound Shoe® – zamknięty but do długotrwałego leczenia ran
- > Relief Dual® – but odciążający
- > MedSurg, MedSurg Pro® – but pooperacyjny

### Materiały:

Wkładka wewnętrzna ma wysokość 15 mm i wykonana jest z poliuretanu.

Wyściółka wkładki wykonana jest z poliestru.

Dostarczone oddzielnie dno wkładki wykonane jest z EVA (40° Shore)

### Konserwacja:

Produkt nie wymaga konserwacji.

### Cechy konstrukcyjne:

Wkładka PegContour® Insole wykonana jest w 100% z poliuretanu i zapewnia perfekcyjną redystrybucję

## Uwaga

Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych (np. obrzęku skóry, odcisków, zaburzeń krążenia krwi itp.) należy poinformować lekarza. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem nie można już zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony. W przypadku wyjęcia elementów na dużej powierzchni może dojść do starzenia zmęczeniowego warstwy pokrywającej. Niniejszy środek pomocniczy służy w połączeniu ze specjalnym butem do leczenia i może być stosowany wyłącznie zgodnie z instrukcjami lekarza lub fachowego personelu medycznego (lub po konsultacji). Firma DARCO (Europe) GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Zaleca się noszenie opatrunków lub skarpetek. Podczas noszenia tego środka pomocniczego w specjalnym bucie zalecamy, aby nie prowadzić pojazdów. Należy zachować szczególną ostrożność i chodzić wolniej niż normalnie. Niniejszy środek pomocniczy jest produktem jednorazowym.

## Instrukcja dotycząca czyszczenia

Wkładkę można czyścić letnią wodą o temperaturze ok. 30° C lub dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi. Wkładki nie należy suszyć na grzejniku, lecz pozostawić ją do wysuszenia w temperaturze pokojowej.



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Phone +49 (0) 88 07.92 28-0  
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
info@darco-europe.com  
www.darco-europe.com

**Distributor**  
ICONIC, Ul. Wrzosowa 28  
60-185 Skórzewo k/Poznań  
tel. 608 332 018  
magdalena.gorna@iconic.pl  
www.iconic.pl

Made in China



190506