

DARCO Posterior Splint



DARCO

Dane techniczne

Model 110 został stworzony w celu wspomagania procesu leczenia patologii w obrębie ścięgna Achillesa.

| Rozmiary: | Rozmiary: | Rozmiary: | Długość stopy w splincie: | Wielkość części goleniowej w splincie: |
|-----------|------------|-----------|------------------------------|---|
| S 90° | S 90° Plus | S 110° | 265 mm | 340 mm |
| M 90° | M 90° Plus | M 110° | 295 mm | 370 mm |
| L 90° | L 90° Plus | L 110° | 325 mm | 400 mm |

Uniwersalny, może być stosowany na prawą oraz lewą kończynę.

Kolor: biało-niebieski

Material:

Skorupa zewnętrzna: poliwęglan

Wyściółka wewnętrzna: PE

Paski Velcro: Nylon

Naprawy:

Produkt nie wymaga napraw

Uwaga

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją używania. Skontaktuj się ze swoim lekarzem niezwłocznie jeżeli zauważysz jakiegokolwiek efekty uboczne (jak obrzęki, rany, problemy z cyrkulacją krwi, pogorszenie czucia). Funkcjonalność oraz optymalna ochrona nie mogą być zagwarantowane jeżeli produkt nie jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Rekomenduje się stosowanie bandaży w celu ochrony skóry.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

- > stosuj środki do dezynfekcji powierzchni w celu dezynfekcji skorupy oraz wyściółki.
- > nie stosuj żadnych substancji zawierających olej.

Instrukcja użytkowania

DARCO Posterior Splint

System stabilizujący

Zakładanie:

- > Najpierw zabezpiecz bandażem ranę czy też skaleczoną część stopy
- > Wybierz odpowiedni rozmiar szyny pozycjonującej. Wymiar stopy oraz goleni są czynnikami determinującymi rozmiar splintu. W przypadku części na której opiera się goleń, istotnym jest by szyna nie sięgała ponad tylną część kolana, gdyż może to spowodować ucisk w miejscu zgięcia kolana.



1.



2.



3.



4.



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de

Distributor

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl

Made in China



191009