

AirTraveler Walker



DARCO

Instrukcja używania

AirTraveler Walker

1. Odblokuj zapinkę Velcro i wyjmij but wewnętrzny oraz dodatkową gąbkę z buta (zdjęcie 1).
2. Załóż but wewnętrzny oraz zamknij wokół голени przy pomocy rzepów (zdjęcie 2).
3. Umieść nogę w skorupie Walkera. By to ułatwić, rozepnij klamry i rozszerz but dwoma rękoma (zdjęcie 3).
4. Zapnij klamry Velcro rozpoczynając od klamry najbliższej kostki. Upewnij się, że goleń jest komfortowo umieszczona w bucie (zdjęcie 4).
5. Zainstaluj pompkę.
6. Napompuj powietrze w kanały powietrzne. Użyj przezroczystej końcówki pompki (zdjęcie 5). Powietrze jest rozprowadzane równomiernie w bucie wewnętrznym. Odpowiednia ilość powietrza to taka, która zapewnia iż zarówno stopa oraz kostka nie poruszają się swobodnie w bucie. But wewnętrzny powinien zapewnić odpowiednią ochronę dla stopy oraz kostki.

W przypadku odczucia swędzenia czy też wystąpienia bólu, proszę natychmiast zmniejszyć ciśnienie w bucie za pomocą odwrotnej (czarnej) strony pompki (zdjęcie A). Jeżeli ból nie ustąpił, należy zdjąć but i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Opcjonalnie; umieszczanie dodatkowej podkładki z pianki (dostarczanej jako akcesorium):

4 ośmiokątne podkładki (zdjęcie B) są używane do unieruchomienia lub wyścięcia kostki, dzięki czemu pozwala na indywidualne dopasowanie. Umieść podkładki w miejscu, gdzie otarcia muszą być zredukowane lub też gdzie zbyt duża przestrzeń musi zostać wypełniona.

Wskazania

- > w leczeniu obrzęków
- > przy ostrych zwichnięciach
- > w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej, ran otwartych i niewielkich owrzodzeń
- > w celu dokonania odciążenia
- > pooperacyjnie, po zabiegach chirurgicznych na palcach oraz przodostopiu
- > po złamaniach i pęknięciach w obrębie kostki oraz stopy
- > urazy ścięgna Achillesa

Przeciwwskazania:

- > stosowanie AirTraveler Walker nie jest rekomendowane kiedy czucie jest osłabione

Instrukcja dotycząca czyszczenia

By wyczyścić materiał wierzchni jak i wyściółkę wewnętrzną, proszę zastosować letnią wodę o temperaturze około 30 stopni oraz łagodne mydło, jeżeli to będzie konieczne. Umyj warstwę wewnętrzną i wysusz od razu. Zostaw but otwarty by powietrze mogło go samoistnie osuszać. Nie stosuj żadnych suszarek.

1.



2.



3.



4.




5.



A



B

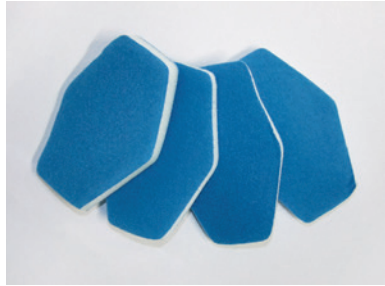

Uwaga

Twój lekarz przepisał Ci produkt, który zastępuje gips na nodze. Konstrukcja kołyskowej podeszwy gwarantuje poprawne fizjologiczne przetaczanie podczas chodzenia. Chodzenie w takim butcie jest trudniejsze niż w normalnym obuwiu, dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

- > Nie prowadź samochodu w takim butcie.
- > Zachowaj szczególną uwagę podczas wchodzenia po schodach i chodzenia po nierównych powierzchniach.
- > Chodź wolniej niż normalnie. Nie nosisz normalnego obuwia, dlatego potrzebne jest więcej miejsca przy stawianiu kroków.

Stosowanie tego produktu powinno być nadzorowane przez lekarza. W przypadku odczucia swędzenia czy też wystąpienia bólu, proszę niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Proszę zwrócić szczególną uwagę w przypadku pacjentów z neuropatią. Chodzi o zapewnienie, by Walker nie powodował ograniczeń w cyrkulacji krwi. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią jakiegokolwiek sytuacje niepożądane takie jak: stwierdzenie bólu, swędzenia, obserwowalnych zmian lub innych wcześniej nie występujących reakcji. Unikaj zbyt mocnego pompowania kanałów powietrznych. Zabezpiecza to przed wywieraniem zbyt dużego nacisku na gołe.

W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z tym produktem jego dobre funkcjonowanie i bezpieczeństwo pacjenta nie może być zagwarantowane.

Dane techniczne

Rozmiar:

Sprzedawany pojedynczo, dostępny w 5 rozmiarach
XS (do 36), S (37 – 38), M (39 – 41), L (42 – 44), XL (45 – 47)

- > dostępne w wersji krótkiej oraz długiej
- > Uniwersalny – można go nosić zarówno na prawej jak i na lewej nodze

Materiał:

Zewnętrzna wkładka: TPR

Wewnętrzna wkładka: EVA

Materiał wewnętrzny: Poliester

Wkładka usztywniająca : Nylon



ICONIC, Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com



DARCO International Inc.
810 Memorial Blvd. | Huntington, WV 25701, USA
Toll-free 800.999.8866 | Phone 304.522.4883
Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com

Manufactured by:

DARCO Int. Trading
(Shanghai) LTD
No. 128 Lane
3458 Hu Min Road
Shanghai 201108, China



170201