

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WKŁADKI

UWAGA

1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.1 OGÓLNE

Produkt został tak stworzony by zachować swe cechy przez okres swojego życia, który jest określany na około 21 dni od rozpoczęcia stosowania, pod warunkiem że był używany i przechowywany zgodnie ze wskazaniami. Cykl życia może się zmienić w zależności od warunków w jakich produkt był używany.

1.2 CZYSZCZENIE ORAZ PRZECHOWYWANIE

- czyścić produkt w letniej bądź zimnej wodzie stosując neutralne mydło; spłucz środki czyszczące po umyciu.
- nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących jak: alkohol, detergenty czyszczące.
- nie stosować materiałów ścierających ani szczotek.

Optima Molliter S.r.l. nie odpowiada za żadne zniszczenia, które powstały podczas stosowania nieodpowiednich środków czyszczących oraz podczas ekspozycji produktu na źródła ciepła.

2. UTYLIZOWANIE PRODUKTU

Tylko niektóre elementy składowe tego produktu są przyjazne naturze, dlatego produkt nie może być taktowany jak normalne śmieci. Rekomendujemy sprawdzić regulacje, które obowiązują w Twoim kraju w tym zakresie.

3. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

DANE	SZCZEGÓŁY
Rok produkcji	2018
Wymiary	zgodnie z rozmiarem oraz modelem
Waga	zgodnie z rozmiarem oraz modelem
Klasyfikacja	klasa I, zgodnie z normą 93/42 CEE i dalszymi zmianami
Oznaczenie serii	patrz na kod znajdujący się na opakowaniu
Rozmiary	S [34-35-36] M [37-38-39] L [40-41-42] XL [43-44-45] XXL [46-47-48]

Produkt oraz wkładki zostały w całości wyprodukowane we Włoszech.

4. GWARANCJA

Gwarancja obejmuje defekty w materiale oraz wady powstałe w procesie produkcji. Dotyczy to wymiany produktów, które zostaną ocenione przez producenta jako wadliwe.

Gwarancja nie dotyczy:

- zniszczeń spowodowanych w transporcie, które nie zostały przekazane przez kupującego dostawcy po odbiorze towaru,
- napraw dokonanych przez inne firmy,
- normalnego zużycia wynikającego z niepoprawnego stosowania produktu,
- zniszczeń dokonanych przez użytkownika, wynikających z niepoprawnego stosowania produktu, jego naprawy oraz przechowywania.

4.1 ZWROTY

Produkt posiadający defekt może być zwrócony po wcześniejszym uznaniu tego faktu przez firmę Optima Molliter S.r.l.

W takiej sytuacji produkt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z załączonym dowodem zakupu oraz przedpłaconymi kosztami wysyłki.

W przypadku nieuznania reklamacji produkt zostanie wymieniony i odesłany na koszt klienta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KIT 3*3 GRAZ KIT CLHEEL

Wkładki modularne Kit3*3 oraz Kit CLHeel zostały stworzone w celu redystrybucji nacisku na podszwowej część stopy i używane są specjalnie w przypadku występowania owrzodzeń na przodostopiu, śródstopiu oraz na pięcie.

KIT 3*3



KIT CLHEEL



Wkładka Kid 3*3 składa się z 9 elementów, które poskładane są podobnie jak puzzle, by uformować trójwarstwową strukturę wkładki. W przypadku obuwia Optima CLHeel ważnym jest by umieścić białą wkładkę (dostarczaną w komplecie) pod trójwarstwową kolorową wkładką Kit CLHeel.

Wkładka składa się z elementów o 3 różnych gęstościach (mała=czerwona, średnia=beżowa, duża=niebieska) i mogą być umieszczane dowolnie horyzontalnie bądź wertykalnie. Proste wymiany modułów pozwalają pacjentowi na optymalną redystrybucję nacisku w pożądanym miejscu.

Osiągnięcie oczekiwanego efektu uwolnienia nacisku z miejsca owrzodzenia dokonuje się poprzez indywidualne dopasowanie elementów wkładki.

DOSTOSOWYWANIE WKŁADKI KIT 3*3 I CLHEEL DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

A. PACJENCI O WADZE MNIEJSZEJ NIŻ 90 KG.

(Zaznacz owrzodzenie / ranę na beżowej wkładce)

1. Okryj owrzodzenie / ranę na podeszwowej części stopy przezroczystym materiałem i używając pomadki bądź zmywalnego pisaka zaznacz obwód owrzodzenia / rany na materiale okrywającym [Zdj. T.1];
2. Umieść całą wkładkę 3*3 w bucie i upewnij się, że beżowa wkładka jest w kontakcie ze stopą (beżowa-czerwona-niebieska);
3. Umieść stopę pacjenta w bucie i pomóż pacjentowi przejść około 10 kroków. W ten sposób podeszwowa część stopy odbije na wkładce miejsce rany;
4. Wymij wkładkę z buta;
5. Za pomocą długopisu obrysuj odbicie miejsca rany z dodatkowym marginesem około 6-8 mm [Zdj.T.2a];
6. Przy pomocy skalpela perforuj narysowany obrys rany i ukosuj jego brzegi [45 stopni] [Zdj.T.2b];
7. Złóż komponenty wkładki zgodnie z oczekiwaną redystrybucją nacisku (patrz diagram A) i umieść tak przygotowaną wkładkę w bucie;
8. Upewnij się, że element z wyciętym otworem znajduje się w środkowej warstwie wkładki;

UWAGA: MIEJSCE Z OTWOREM ODCIĄŻAJĄCYM NIE MOŻE BYĆ W KONTAKCIE Z RANĄ / OWRZODZENIEM.

9. W celu uniknięcia infekcji zabezpiecz ranę / owrzodzenie odpowiedni opatrunkiem zanim umieścisz ją na wkładce;
10. Po założeniu bandaża bądź skarpety but z wkładką może być stosowany przez pacjenta.

B. PACJENCI O WADZE POWYŻEJ 90 KG.

[Zaznacz owrzodzenie / ranę na niebieskiej wkładce]

1. Okryj owrzodzenie / ranę na podeszwowej części stopy przezroczystym materiałem i używając pomadki bądź zmywalnego pisaka zaznacz obwód owrzodzenia / rany na materiale okrywającym [Zdj. T.1];
 2. Umieść całą wkładkę 3*3 w butcie i upewnij się, że niebieska wkładka jest w kontakcie ze stopą (niebieska -beżowa-czerwona);
 3. Umieść stopę pacjenta w butcie i pomóż pacjentowi przejść około 10 kroków. W ten sposób podeszwowa część stopy odbije na wkładce miejsce rany;
 4. Wymij wkładkę z buta;
 5. Za pomocą długopisu obrysuj odbicie miejsca rany z dodatkowym marginesem około 6-8 mm [Zdj.T.3a];
 6. Przy pomocy skalpela perforuj narysowany obrys rany i ukosuj jego brzegi (45 stopni) [Zdj.T.3b];
 7. Umieść niebieską część z otworem na odpowiadającemu kształtem elemencie o kolorze beżowym. Oznacz otwór. Wykonaj taki sam otwór we wkładce beżowej[Zdj.T.3c];
 8. Złóż komponenty wkładki zgodnie z oczekiwaną redystrybucją nacisku (patrz diagram B) i umieść tak przygotowaną wkładkę w butcie;
 9. Upewnij się, że niebieski element z wyciętym otworem znajduje się w środkowej warstwie wkładki a element beżowy znajduje się poniżej;
- UWAGA: MIEJSCE Z OTWOREM ODCIĄŻAJĄCYM NIE MOŻE BYĆ W KONTAKCIE Z RANĄ / OWRZODZENIEM.**
10. W celu uniknięcia infekcji zabezpiecz ranę / owrzodzenie odpowiedni opatrunkiem zanim umieścisz ją na wkładce;
 11. Po założeniu bandaża bądź skarpety but z wkładką może być stosowany przez pacjenta.

UWAGA: WYMIENIAJ CAŁY ZESTAW WKŁADEK KIT3*3 ORAZ KIT CLHEEL CO 21 DNI TAK JAK ZALECA SPECJALISTA (W PRZYPADKU GDY OWRZODZENIE/RANA NIE SĄ JESZCZE LECZONE).

W razie, gdyby Państwo potrzebowali więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Zdj. T.1



Zdj. T.2a



Zdj. T.2b



Zdj. T.3a



Zdj. T.3b



Zdj. T.3c

Diagram A

dostosowywanie do indywidualnych potrzeb pacjentów ważących **mniej niż 90 kg**


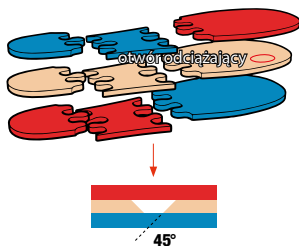


Diagram B

dostosowywanie do indywidualnych potrzeb pacjentów ważących **powyżej 90 kg**

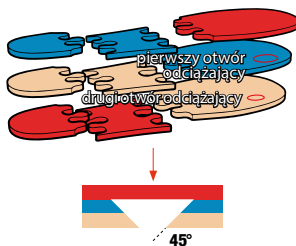


PLTM

UWAGA: PLTM może być stosowana tylko po przepisaniu jej przez specjalistę. Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb dokonane musi być przez specjalistę, lekarza, technika ortopedę czy też wykwalifikowany personel medyczny.

PLTM jest stworzona dla pacjentów po amputacjach w obrębie przodostopia.

1. Usunąć osłonę na podklejonej taśmie Velcro i umieścić na wewnętrznej powierzchni wkładki;
2. przyłożyć pomarańczowy materiał zaczepami Velcro;
3. Umieścić stopę po amputacji na wkładce upewniając się zabezpieczona jest przestrzeń około 1,5 cm pomiędzy stopą a pomarańczowym materiałem (Zdj.U);
4. Zawsze zabezpieczaj stopę odpowiednim opatrunkiem. Załóż ochronną skarpetę dostarczaną wraz z produktem.

Zdj. U

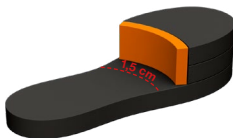



**DOSTOSOWYWANIE
WKŁADEK DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB**

DOSTOSOWYWANIE WKŁADEK ODCIĄŻAJĄCYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB




STOPA/RANA

WKŁADKA 1

WKŁADKA 2

WKŁADKA 3

Pacjent < 90 Kg

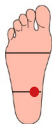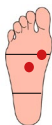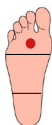

DOSTOSOWYWANIE WKŁADEK ODCIĄŻAJĄCYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB


STOPA/RANA

WKŁADKA 1

WKŁADKA 2

WKŁADKA 3

Pacjent ≥ 90 Kg

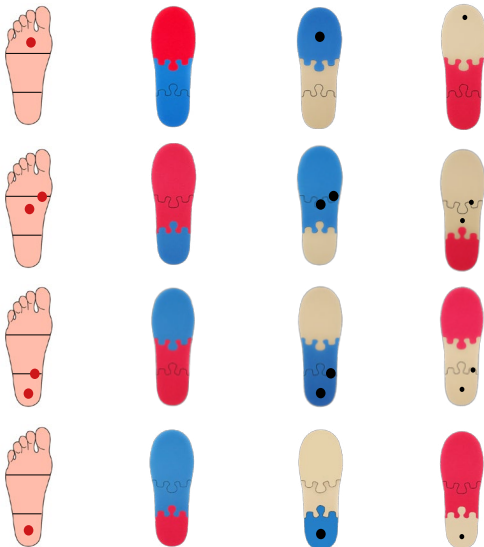

WAŻNE ZASADY	Rana jest zawsze ulokowana powyżej czerwonego elementu wkładki
	Pacjent o wadze < 90 kg - perforacja tylko jednej warstwy wkładek
	Pacjent o wadze > 90 kg - perforacje w 2 warstwach wkładek
	Staraj się tak dobrać rozmiar buta, by był większy od aktualnie noszonego o jeden rozmiar
	5 rozmiarów: S [34-35-36], M [37-38-39], L [40-41-42], XL [43-44-45], XXL [46-47-48]
	Gęstość elementów wkładek w skali Shore-a: czerwona - mała gęstość beżowa - średnia gęstość niebieska - duża gęstość

ICONIC

Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/ Poznań
Tel +48 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl

Optima Molliter

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com