

## SEAL-TIGHT® - Instrukcja stosowania

### **ochraniacz przed wodą i wilgocią.**

Nie wszyscy wiedzą w jak prosty sposób można ochronić opatrunek lub gips przed wodą. Przy pomocy ochroniaczy SEAL-TIGHT® można zapewnić utrzymanie opatrunków suchości.

Instrukcja stosowania ochroniaczy SEAL-TIGHT®:

Po wyjęciu ochroniacza z opakowania, prosimy go dokładnie rozwinąć.

#### ZAKŁADANIE OCHRANIACZA

Zanim naciągniesz SEAL-TIGHT® na opatrunek lub gips najpierw rozciągnij gumową membranę przy pomocy kciuków, równocześnie przytrzymując okrągłą obręcz, i włóż w otwór kończynę. **NIE NACIĄGAJ OCHRANIACZA TRZYMAJĄC ZA MEMBRANĘ!** Następnie pociągnij plastikową obręcz w górę gipsu lub opatrunku tak, by membrana pozostała poza nimi na ciele pacjenta.

#### ZDEJMOWANIE OCHRANIACZA

Wysusz gumową membranę i rozciągnij ją tak jak przy zakładaniu ochroniacza, by następnie łatwo przesuwiała się po gipsie lub opatrunku. **NIE CIĄGNIJ ZA WOREK PODCZAS ZDEJMOWANIA!**

Produkt stosowany podczas codziennych kąpieli. Podczas zanurzania w wodzie nie obciążaj plastikowej obręczy.

Ten model ochroniacza nie jest przeznaczony do stosowania podczas kąpieli rekreacyjnych. Proszę zachować ostrożność podczas stosowania ochroniacza w wodzie, ponieważ mimo zastosowanych specjalnych materiałów, worek może być śliski, gdy jest mokry.

Gdy stosują go dzieci, powinny to robić w asyście rodziców lub opiekunów.

Skonsultuj się z lekarzem, gdy membrana będzie powodowała jakiegokolwiek dolegliwości.



gwarantuje, że dostarczony produkt jest wolny od wad produkcyjnych. Przeznaczony do stosowania indywidualnego.