

MECRON ReadyDressment Strips

Pooperacyjne tape-y stabilizujące

Zabezpiecz rezultaty zabiegu chirurgicznego przy pomocy prefabrykowanych elastycznych tape-ów, które są gotowe do natychmiastowego zastosowania, np. zaraz po zabiegach małoinwazyjnych.

Nowość z DARCO



Stabilizacja po zabiegu DMMO przy zastosowaniu tape-ów



Stabilizacja po zabiegu DMMO przy zastosowaniu tape-ów

Wskazania | Pooperacyjnie oraz po małoinwazyjnych zabiegach w obrębie stopy:

- > osteotomie Akin-a
- > osteotomie Chevron-a
- > DMMO (małoinwazyjna osteotomia pierwszej kości śródstopia)
- > korekcje palców młotkowatych oraz krogulczych
- > rekonstrukcje palców podkurczających
- > cock-up toe D-V (ustawienie przeprostne palucha ze zgięciem w stawie paliczkowym)
- > korekcje koślawości V kości śródstopia
- > tenotomie

MECRON

Przykładowe zastosowania



Osteotomia Akin-a

Technika chirurgiczna:
osteotomia paliczka bliższego palucha

Technika tapeingu:
Tape biegnie od paliczka dalszego do paliczka bliższego po stronie przyśrodkowej, podczas zakładania doprowadzić do delikatnego ściskania.



Osteotomia Chevron-a

Technika chirurgiczna:
osteotomia głowy pierwszej kości śródstopia w celu korekcji szpotawości kości śródstopia przy płaskostopiu.

Technika tapeingu:
zabezpieczenie rezultatów korekcji przy pomocy tape-u biegnącego od strony przyśrodkowej do bocznej pod lekkim napięciem.



Cel:

- > dynamiczna stabilizacja
- > nie wymaga wiązania
- > pozwala na wczesną i funkcjonalną rekonwalescencję
- > indywidualna kontrola
- > zapewnia dłuższe działanie niż plastry

Cechy:

- > elastyczna oraz rozciągliwa do 60%
- > łatwa w zakładaniu
- > umiejscowienie tape-ów może być szybko skorygowane
- > oferowane w 2 długościach, dzięki czemu można je dostosować do anatomii pacjenta
- > można stosować przez kilka dni, bez ograniczeń
- > prefabrykowane i gotowe do stosowania
- > nie podrażniają skóry

ROZMIAR	SYMBOL BIAŁY	SYMBOL NIEBIESKI	
Krótki 8 sztuk, 10 × 1,4 cm (długość przy rozciągnięciu do 16,5 cm)	MRSW-1	MRSB-1	* Podziękowania: zdjęcia pochodzą z książki „Minimally Invasive Foot Surgery” dzięki uprzejmości doktora Mariano de Prado.
Krotki – duże opakowanie 500 sztuk, 10 × 1,4 cm	MRSW500-1	MRSB500-1	
Długi 4 sztuki, 13,5 × 1,8 cm (długość przy rozciągnięciu do 22 cm)	MRSW-2	MRSB-2	
Długi – duże opakowanie 500 sztuk, 13,5 × 1,8 cm	MRSW500-2	MRSB500-2	